



# FAVOCID

Concentrate

## Dezinfekcija dentālajām atsūkšanas sistēmām

- plaša spektra iedarbība
- augsta materiāla saderība ar atsūkšanas sistēmām, amalgamas separatoriem, spļautuvēm draudzīgs
- Bez aldehīdiem
- Videi draudzīgs
- Efektīvs izmantošanā
- Efektīvi likvidē mikroorganismus

### Augsts iedarbības spektrs

- Baktericīds
- Levorucidāls, (Candida albicans)
- Pretvīrusu (tai skaitā HIV, HBV, HCV)

### Aktīvās sastāvdaļas:

100 g Favocid sastāv:

- 7,5 g Dimethyldioctylammonium chloride
- 0,6 g Benzyldimethyldodecyl ammonium chloride

### Ekspozīcijas laiks:

Baktericīds (testēts saskaņā ar VAH/DGHM)

Fungicidal/Levurocidal

- organic load 1.0 % 60 min
- 2.0 % 5 min
- 3.0 % 2 min

Pretvīrusu (tai skaitā HIV, HBV, HCV)

- organic load 2.0 % 2 min



### Iedarbības diapazons :

**Favocid** ir augstas kvalitātes dezinfekcijas līdzeklis dentālajām atsūkšanas sistēmām, kā arī spļautuvēm un amalgamas separatoriem. Atsūkšanas sistēmas vēlams dezinficēt 1-2 reizes dienā, ieteicams ar 1 litru gatavu lietošanai šīdumu.

Pieejami divi tilpumi 1 l, 5l